

Terapia del vuoto ErecAid™

Riabilitazione in seguito a prostatectomia radicale e per disfunzione erettile in generale



pompa manuale



anello di tensione



anello di tensione speciale

Tutti i vantaggi a colpo d'occhio:

- Terapia semplice e conveniente della disfunzione erettile
- Soprattutto per la riabilitazione dopo prostatectomia radicale
- Allenamento manuale quotidiano della circolazione del corpo cavernoso (fisioterapia)
- Favorisce e stabilizza l'anatomia del pene (agisce contro fibrosi e atrofia)
- Nessun effetto collaterale spiacevole
- Anelli di tensione anatomici in diverse misure e materiali
- Singoli componenti del set disponibili singolarmente

Informazioni importanti:

- La terapia del vuoto ErecAid™ andrebbe iniziata con calma e possibilmente evitando di sentirsi sotto pressione. Prima di tutto bisognerebbe avere pazienza e condurre uno stile di vita attivo.
- Nelle prime tre settimane è consigliabile seguire una sessione di allenamento di 5 minuti al giorno, in cui si simula l'erezione senza l'anello di tensione. Occorre fare una pausa di 10 – 15 secondi tra una pompata e l'altra in modo da evitare la possibile comparsa di un ematoma.
- Bisognerebbe continuare la sessione di allenamento di 5 minuti ogni giorno per 3 mesi, poi è sufficiente a giorni alterni. In questo modo si possono stabilizzare i risultati già raggiunti e migliorarli.
- Per trovare la misura corretta dell'anello di tensione, iniziare sempre con il diametro più grande (22 mm). Se si ottengono già così i risultati auspicati, continuare ad utilizzare questo diametro. Si possono provare anche i diversi gradi di durezza degli anelli. Se la misura non dovesse andare bene, provare quella leggermente più piccola (19 mm).
(Misure: 22 mm; rosa = duro, beige = morbido, antracite = extra morbido; 19 mm; rosa = duro, beige = morbido, antracite = extra morbido)

Se non si trova l'anello adatto, sono disponibili anche anelli speciali (vedere l'immagine in alto a destra). Questi si applicano facilmente sul cilindro, come un coperchio.

- ErecAid™ può anche essere utilizzato in concomitanza™ con un trattamento farmacologico. Grazie all'allenamento regolare con ErecAid™, molti pazienti riferiscono di ottenere già buoni risultati con il più basso dosaggio possibile dell'inibitore della PDE-5. Ne consegue anche un miglioramento dell'erezione e dell'anatomia del pene.