


# VenoSeal™

## Un aiuto per la fuga venosa

In un uomo con fuga venosa le vene del pene non riescono a trattenere abbastanza a lungo il sangue durante un'erezione e così si verifica il cosiddetto deflusso venoso, solitamente durante un rapporto (attività) sessuale. Pertanto il problema non è avere un'erezione, bensì mantenerla. VenoSeal™ vi supporta in questo.

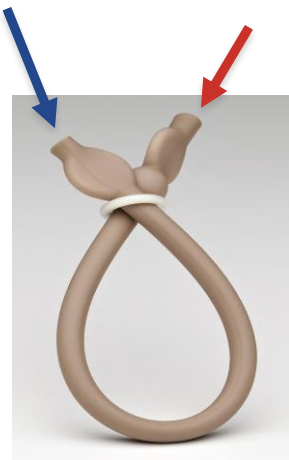

### Tutti i vantaggi a colpo d'occhio:

- Semplicità d'uso
- Maggiore comfort grazie a un materiale piacevolmente morbido
- Colore molto discreto
- Supporto per gli inibitori della PDE-5
- Riutilizzabile (non è un dispositivo monouso)

### Brevi istruzioni per l'uso:

- Posizionare il laccio in corrispondenza della radice del pene (prima o durante l'erezione)
- L'estremità con la punta arrotondata (**freccia rossa**) dovrebbe essere rivolta verso l'alto
- Afferrare l'estremità senza la punta arrotondata (**freccia blu**) con il pollice e l'indice
- Tirare orizzontalmente dalla punta arrotondata finché l'anello non è fissato
- Stringerlo forte finché il deflusso di sangue non è arrestato (pressione minima)
- Dopo 30 minuti l'anello dovrebbe essere allentato, tirandolo all'estremità con la punta arrotondata, e in tale modo il laccio si allarga

### Informazioni importanti:

- VenoSeal™ non sostituisce mai il consulto del medico!
- La disfunzione erettile è un sintomo che può rivelare la presenza di diverse malattie