

Anello di tensione SurErec

Utilizzo efficace dell'anello di tensione SurErec insieme al sistema di terapia del vuoto Osbon ErecAid™

L'anello SurErec è disponibile in quattro diverse misure:

- 4 = 16 mm di diametro
- 5 = 17 mm
- 6 = 18 mm
- 7 = 19 mm


Il numero dell'anello è leggibile sul bordo esterno dell'anello.

Facendo un paio di prove, riuscirete a trovare l'anello giusto per voi. Iniziare sempre con l'anello più grande (misura 7). Se con questo anello si ottiene un'erezione soddisfacente, consigliamo di continuare ad utilizzare questa misura, altrimenti provare quella leggermente più piccola. È importante ottenere sempre l'erezione con la minor pressione possibile, questo anello non dovrebbe essere utilizzato come un "laccio emostatico".

Utilizzo

1. Inserire l'anello sul cilindro

La superficie liscia dell'anello, montato sul cilindro, è rivolta verso l'esterno. È importante che entrambi i punti di pressione del corpo cavernoso siano rivolti verso l'ombelico.

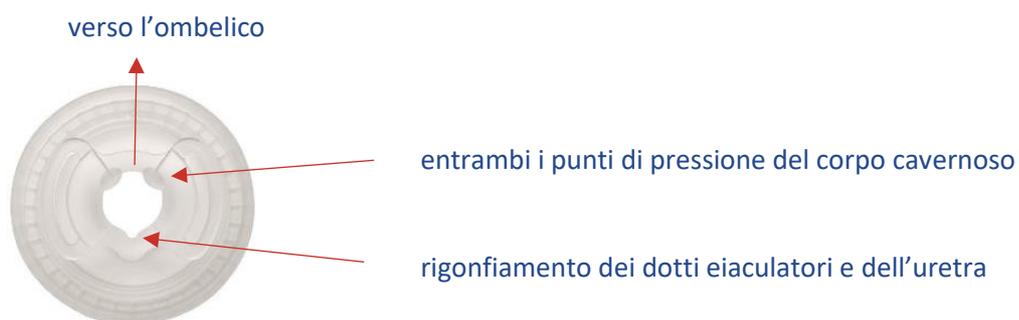

2. Spalmare il lubrificante Personal Gel sul pene e sull'anello

Spalmare una quantità adeguata di lubrificante all'interno dell'anello e sul pene (compreso il glande).

3. Inserire insieme il cilindro e la pompa del vuoto e posizionare il pene

Quando l'anello SurErec è posizionato correttamente, è visibile una scritta sul lato superiore del cilindro. Posizionare il pene proprio davanti all'entrata del cilindro.

4. Creare il vuoto nel cilindro

A questo punto iniziare a pompare in modo che il pene possa scorrere, senza alcuna pressione, attraverso l'anello nel cilindro. Bisogna attendere 10 – 25 secondi tra le singole pompate in modo da poter garantire un flusso di sangue ottimale nel corpo cavernoso. Per ottenere un'erezione ottimale, tra una pompata e l'altra è possibile ridurre leggermente il vuoto, premendo il tasto verde, per poi riprendere nuovamente a pompare. Continuare a pompare solo finché non si ottiene l'erezione desiderata. Con un po' di esercizio si impara rapidamente qual è l'erezione corretta. Un pene troppo "duro" compromette il rapporto sessuale. (minore sensibilità, eventuale pressione eccessiva, ecc.)

5. Estrarre il cilindro dall'anello

Una volta ottenuta l'erezione desiderata (solitamente il pene è chiaramente visibile sul fondo del cilindro), premere nuovamente il tasto verde per rimuovere il cilindro. Spalmare eventualmente il lubrificante Personal Gel anche sulla vagina della donna.

6. L'anello deve essere rimosso dal pene dopo il rapporto sessuale o al massimo dopo 30 minuti

Dopo il rapporto sessuale bisogna spalmare nuovamente il lubrificante sul pene per facilitare la rimozione dell'anello. Tirare l'anello usando le linguette in modo che il pene possa afflosciarsi un po', poi estrarlo lentamente.

È importante rispettare un periodo di riposo di almeno 60 minuti fino al successivo rapporto sessuale.

7. Pulizia

Pulire l'anello solo con acqua calda e sapone liquido.